



TV 10

APPAREIL DE DÉPRESSO-MASSAGE (Vacuodermie®)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids :	6.5 kg	Puissance :	65 W	Intensité sonore :	43 dB<I>46 dB
Dimensions :	40*31 *10cm	Intensité / Fréquence :	240 V/50 Hz		
Aspiration :	Réglable: -50 – 900 mB			CEI 601-1# 0124/601-1/1	

Mode de régulation de la pression :

↪ Manuel, selon les besoins de chaque protocole de soin

Durées ajustables :

↪ Durée de 20 à 45 minutes, selon les types de séance et la nature de la peau à traiter.

Modes d'utilisation :

- ↪ Vacuodermie® glissée (VdG)
- ↪ Vacuodermie® stationnaire (VdS)
- ↪ Vacuodermie® drainante (VdD)
- ↪ Vacuodermie® à pression constante (VdPC)

Les effets :

- ↪ Effet drainant (élimination des déchets organiques)
- ↪ Libération assouplissement de la trame conjonctive
- ↪ Effet de tonification (stimulation des des fibres élastiques)
- ↪ Effet antalgique (stimulation des mécanorécepteurs)
- ↪ Effet d'hyper vascularisation (oxygénation et action sur le métabolisme cellulaire)



PRINCIPE ET APPLICATIONS

La Vacuodermie® est un concept innovant de massage permettant de réaliser, à l'aide de différentes têtes d'aspiration et de ventouses transparentes, des traitements allant de la profondeur vers la surface.

Le pli formé par la dépression ou aspiration (modulable en intensité) permet une mobilisation spécifique des plans cutanés sous-jacents.

Les manipulations ainsi réalisées, sans pincement et sous contrôle visuel permanent, permettent l'accès à toute une gamme de traitements, jusqu'à lors impossibles à effectuer manuellement.

La technologie du TV10 permet de moduler l'aspiration en forme et en intensité.

On peut ainsi utiliser :

- une dépression constante
- une dépression alternativement basse ou haute.

Le réglable indépendant des différents paramètres permet une infinité de possibilités.

INDICATIONS

- Rhumatologie
- Traumatologie
- Cicatrices (chirurgie plastique & réparatrice)
- Réflexologie
- Insuffisances veineuses & lymphatiques
- Esthétique (corps & visage)
- Kinésithérapie du sport (lésions musculaires, ligamentaires, entraînement et récupération)

CONTRE INDICATIONS

- Erythème
- Dermatose
- Ecchymose
- Tumeur cutanée
- Maladie infectieuse ou inflammatoire évolutive en période de poussée.

ACCESSOIRES

VM01	Petite/rigide Cicatrices	Ø 6 mm (PVC)	
VM02	Petite / souple Cicatrices et rides	Ø 10 mm (PVC)	
VM03	Petite / rigide Cicatrices et rides	Ø 12 mm (PPMA)	
VM04	Cicatrices Massage réflexe	Ø 17 mm (PPMA)	
VM05	Drainage Massage décontracturant ou relaxant Médecine du sport	Ø 35 mm (PET)	
VM06	Taille medium Médecine du sport Rhumatologie	Ø 60 mm (PET)	
VM07	Grande taille Rhumatologie	Ø 90 mm (PET)	
VM08	Flexible simple	Ø 4/8 mm (PVC)	
VE01	Equipée d'un manche Esthétique	Ø 65 mm L: 78 mm (PET)	
VE03	Equipée d'un manche Esthétique	L: 90 mm l: 50 mm (PET)	
VE04	Equipée d'un manche et d'un double rouleau Esthétique	L: 90mm l: 80 mm (PET)	
VM10	Tube d'aspiration «Y» pour multi-applications	L: 2500 mm (PVC)	
PN33	Kit complet 8 accessoires Têtes d'aspiration + flexible d'aspiration simple + Filtres	-	
PU03	Accessoire support flexible pour TV10 et TV20	H: 60 cm	
PU05	Guéridon standard sans tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	
PU06	Guéridon standard avec tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	